


## Indstil WiFi til opdateringer på OrCam.

1. Gå til hjemmesiden <https://www.orcaml.com/da/wifiset/>

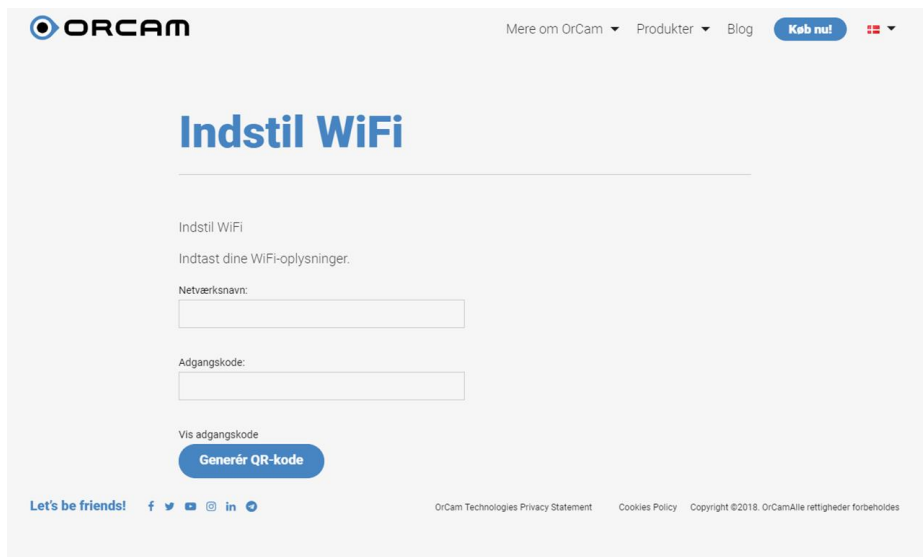

ORCAM

Mere om OrCam ▾ Produkter ▾ Blog **Køb nu!** 🇩🇰 ▾

## Indstil WiFi

Indstil WiFi

Indtast dine WiFi-oplysninger.

Netværksnavn:

Adgangskode:

Vis adgangskode

**Generér QR-kode**

Let's be friends! [f](#) [t](#) [v](#) [@](#) [in](#) [o](#)

OrCam Technologies Privacy Statement Cookies Policy Copyright ©2018. OrCamAlle rettigheder forbeholdes

2. Indtast Netværksnavn og Adgangskode.
3. Tryk på knappen "Generér QR-kode".
4. Sørg for at OrCam er tilsluttet strøm.
5. Åbn menuen på OrCam ved at trykke og holde tænd/sluk knappen inde, lav 'spol frem' bevægelse på Touch fladen og slip tænd/sluk knappen igen.
6. Gå tilbage i menuen (lydniveau ned bevægelse) til "generelle indstillinger" og vælg denne.
7. Vælg "WiFi indstillinger" og tryk én gang på Touch fladen og hold den op foran QR-koden på skærmen.
8. Den vil herefter indlæse netværksindstillinger og tilslutte netværket. Bemærk, det kan tage 10-15 sekunder at tilslutte til netværket. Man vil høre den bippe imens.
9. Fremadrettet vil OrCam automatisk tilslutte netværket når den bliver sat til strøm, og også informere hvis der er en tilgængelig opdatering.